

İstifadəsi üzrə təlimat
KOLDİSEPT nanoSİLVER
qulaq damcısı

Tibbi vasitə.

Dərman vasitəsi deyildir.

Təsiredici maddələr: Qliserin (Glycerin 30-45%), propilenqlikol (Propylene Glycol 20-40%), gümüş nanokolloidi (Silver nanocolloid 5-10%), mis nanokolloidi (Copper nanocolloid 20-30%), təmizlənmiş su (Purified water 15-20%)

İstifadəsinə göstərişlər

Qulaq damcıları şəklində istifadəyə buraxılan Koldisept nanoSilver tibbi vasitə istənilən çirkin yumşaldılması və xaric edilməsi məqsədi ilə xarici qulaq keçəcəyi kanalına yeritmək və eləcə də, dəri üzərində qoruyucu baryerin formalaşması hesabına bakterial və göbələk mənşəli infeksiyaların törətdikləri xarici qulaq keçəcəyi kanalının iltihabı zamanı nəzərdə tutulmuşdur.

Tərkibinə bakteriyaların və göbələklərin inkişafını məhdudlaşdıran və xarici qulaq keçəcəyinin müxtəlif etiologiyalı iltihabının müalicəsinə səbəb olan gümüş və mis nanohissəcikləri daxildir. Məhsulun istifadə şərtləri: fərdi tələbatlara müvafiq sisteməlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki və funksional xarakteristikaları

<i>Parametrin adı</i>	<i>Təsviri</i>
<i>Məhsulun təsviri və quruluşu</i>	Qapaqlı və ilk açılmaya nəzarətli damcısalan flakonda maye.
<i>Dolma həcmi</i>	15 ml
<i>Möhtəviyyatın təsviri</i>	Şəffaf və ya bir qədər bulanıq, ağdan yüngül sarımtıl qədər rəngli, içərisində görünən həll olunmayan hissəciklər olmayan homogen maye.

İstifadə qaydası və dozası

Dozalanma rejimi

Qulaq damcıları şəklində istifadəyə buraxılan Koldisept nanoSilver tibbi vasitə – gündə 3 dəfə təyin olunur və iltihab simptomları aradan qalxdıqdan sonra, bir qayda olaraq, minimum ilk 3 gün müddətində istifadə edilir.

İstifadə qaydası

1. Flakon ehtiyatla (yaxşı olar ki, əllərin içərisində) qızdırılmalıdır.
2. Başı xəstə qulağın əks tərəfinə çevirmək və ya elə uzanmaq lazımdır ki, xəstə qulaq yuxarıya doğru olsun.
3. Xarici qulaq keçəcəyi kanalına 5 damcı maye daxil etmək (həkim tərəfindən digər dozalanma rejimi təyin edilmədiyi halda) və həmin vəziyyətdə 3-5 dəqiqə qalmaq lazımdır.

Tibbi vasitənin istifadəsi ilə əlaqəli əlavə təsirlər, digər tibbi vasitələrlə və ya müxtəlif dərman preparatları ilə birlikdə istifadəsi

Əlavə təsirlər barədə heç bir məlumat yoxdur.

Yüksək həssaslığa malik pasiyentlərdə allergiya simptomlarının meydana çıxması istisna edilmir. Allergiya simptomları meydana çıxdığı halda tibbi vasitənin istifadəsini dayandırmaq tələb olunur.

İstifadəsi üzrə təlimatda qeyd olunmayan bütün əlavə effektlər, arzuolunmayan reaksiyalar, məhsulun digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsir xüsusiyyətləri, göstərilən tibbi vasitənin

istifadəsi zamanı pasiyentin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan faktlar və vəziyyətlər barədə pasiyentin müalicə olunduğu ölkənin səlahiyyətli orqanına məlumat verilməlidir.

Əks göstərişlər

- Komponentlərə qarşı fərdi dözümsüzlük;
- qulaq pərdəsinin perforasiyası (deşilməsi).

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

- Dozalayıcı damcısalanı xarici qulaq keçəcəyi kanalına həddindən artıq dərin daxil etmək olmaz;
- Gözlərin və ağız boşluğunun selikli qişalarına təsadüfən düşməsindən çəkinmək lazımdır;
- İstənilən narahatlıqla əlaqəli simptomlar meydana çıxdığı halda, məhsulun istifadəsi dayandırılmalıdır;
- Hamilə qadınlara və 6 yaşa qədər uşaqlara tibbi məhsulu yalnız həkim nəzarəti altında istifadə etmək tövsiyə olunur.

Buraxılış forması

15 ml, qapaqlı və ilk açılmaya nəzarətli damcısalan plastik flakonda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən yuxarı olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

İstehsalçı

ARKONA Qjeqoja Kalbarçik Stomatoloji Farmakologiya Laboratoriyası, Nasutuv 99C, 21-025 Nemtse, Polşa.

Qablaşmanın üzərində qeyd olunan simvolların təsviri

	Yararlılıq müddəti:
	Seriyası:
	İstifadəsi üzrə təlimatla tanış olmaq lazımdır
	Avropa standartlarına uyğunluq işarəsi